


Réglages complets du Neopuff à faire 1x/jour

1 Ouvrir l'air et vérifier les tubulures

8-10 L/min

2 Obturer la sortie de la pièce en T avec le bouchon ou le poumon test fermer la pièce en T

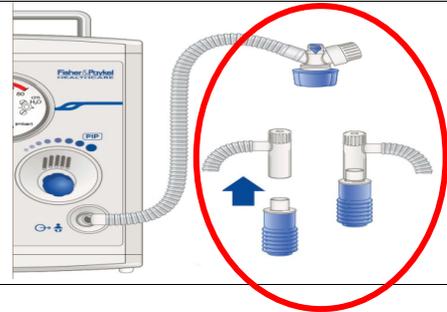


3 Maintenir fermée la pièce en T avec l'index pendant tout le réglage


4 Ouvrir Pmax et PIP à fond en tournant « vers la droite »



5 Régler Pmax à 40 mBar

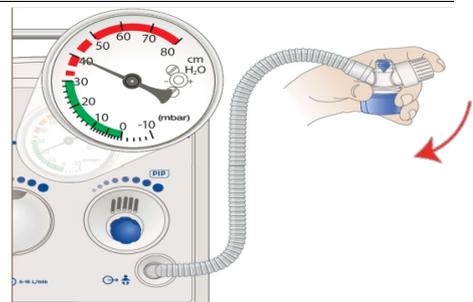

6 Régler PIP à 20 mBar

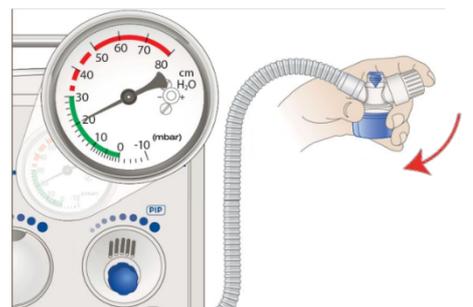

7 Régler PEP à 5 mBar en tournant la valve et en relevant l'index de la pièce en T
Finir en sécurisant le cache de la Pmax
Vérifier les réglages

