

Vérification des réglages du Neopuff

Avant chaque naissance


1 Ouvrir l'air et vérifier les tubulures

10L/min


2 Obturer la sortie de la pièce T avec le bouchon ou le poumon test




3 Vérifier la valeur PEP en ayant l'index levé

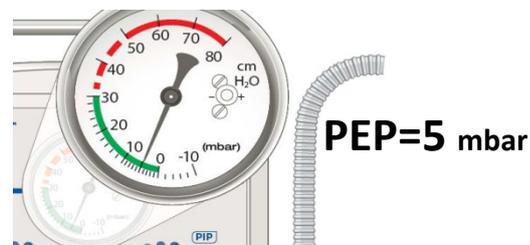

4 Obturer avec l'index la valve de PEP puis vérifier la valeur PIP

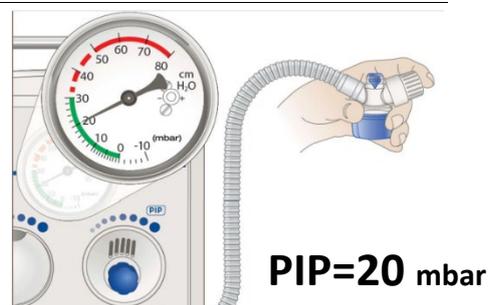

5 Vérifier la valeur de Pmax en tournant le bouton de PIP à fond vers la Droite

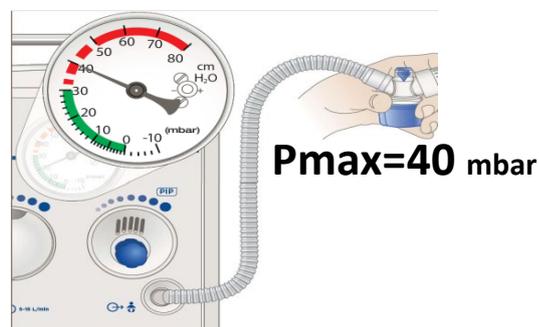

6 Redescendre la PIP à la valeur souhaitée (PIP = 20 mbar)

Si vérification non conforme, passer à la procédure réglage du Neopuff